

## Techniques d'installation et d'essayage d'un Globalprotect®



L'essayage de la protection doit valider le respect des 3 critères :

- Stabilité et rétention parfaites,
- Aucune gêne fonctionnelle (déglutition, ventilation, occlusion, phonation),
- Respect de la dynamique mandibulaire.

Il faut insérer la protection et vérifier sa parfaite stabilité et sa rétention. Il faut s'assurer de l'absence de douleur muqueuse et du libre jeu des freins (en les mobilisant ou en demandant au patient de faire des mimiques de serrage de lèvres).



Le sportif ne doit pas ressentir de gêne et d'inconfort avec son Globalprotect®, mais une protection et une stabilisation de sa mâchoire.



L'aspect important à vérifier par le dentiste est le respect d'une occlusion reproductible et "sans accroche" sur le chemin de fermeture.

Il est parfois nécessaire d'éliminer certaines zones notamment en inter-proximal, sur le devant vers le frein ou en fond de bouche lorsque qu'il y a des points douloureux mais la situation doit d'emblée être très rapprochée.



Une très légère élimination des zones "de sortie d'occlusion" peut-être possible en respectant les critères d'occlusion habituels dans des notions de désengrènement. Enfin si nécessaire, un polissage peut être réalisé avec des meulettes silicones.